



## ШВИДКА ДЕЗІНФЕКЦІЯ СПИРТОВИМИ КОМПОНЕНТАМИ

### Incidin™ Liquid

#### ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСІБ НА ОСНОВІ СПИРТІВ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПОВЕРХОНЬ

Швидкий та надійний спосіб дезінфекції проти широкого спектру мікроорганізмів, таких як бактерії (в тому числі мікобактерії туберкульозу), грибки та віруси.

Incidin™ Liquid має наступні ключові характеристики:

- Короткий час експозиції
- Відсутність барвників та віддушок
- Відмінна сумісність з матеріалами, стійкими до дії спиртів
- Сумісність з системою Incidin™ Dry Wipes System



# Incidin™ Liquid

Готовий до використання засіб на основі спиртів для дезінфекції поверхонь



Incidin™ Liquid  
Пляшка 650 мл



Incidin™ Liquid  
Пляшка 1 л



Incidin™ Liquid  
Каністра 5 л

## ШИРОКИЙ СПЕКТР МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА КОРОТКИЙ ЧАС ЕКСПОЗИЦІЇ

Завдяки своєму широкому спектру мікробіологічної ефективності за короткий час експозиції, Incidin™ Liquid ідеально підходить для проведення швидкої дезінфекції поверхонь та експрес дезінфекції епідемічно значимих об'єктів та інших зон високого ризику. Експозиції детально наведені в таблиці нижче.

## НАДІЙНИЙ У ВИКОРИСТАННІ

Засіб Incidin™ Liquid є готовим до використання засобом з перевіреною та підтвердженою мікробіологічною активністю та сумісністю зі всіма матеріалами, стійкими до дії спиртів. Це забезпечує надійне та широке використання у всіх сферах застосування.

## ВІДСУТНІСТЬ БАРВНИКІВ ТА ВІДДУШОК

Формула засобу не містить барвників та ароматизаторів, що дає можливість використовувати засіб без залишків на поверхнях і забезпечує зручне та безпечне використання продукту персоналом.

## РЕЗУЛЬТАТИ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ТЕСТУВАНЬ

ДОСЛІДЖУВАНА МІКРОБІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ	ЕКСПОЗИЦІЯ
Дезінфекція поверхонь згідно до VАН з/без механічної дії (бактерицидна, фунгіцидна, туберкулоцидна дії)	5 хв
Швидка дезінфекція поверхонь у відповідності з методом VАН 2015 без механічного впливу	1 хв
EN 13727 / EN 13624 / EN 14348 (бактерицидна, фунгіцидна, туберкулоцидна дії)	1 хв
EN 16615 бактерицидна / фунгіцидна дії	1 хв
EN 16615 (метод) туберкулоцидна дія	1 хв
RKI-DVV 01/2004* / EN 14476 проти оболонкових вірусів	30 сек
DVV 2015* / EN 14476 обмежений спектр, віруліцидна дія	10 хв
EN 14476 Аденовірус	1 хв
EN 14476 Норовірус	10 хв
DVV 2015* / EN 14476 (чисті умови) Ротавірус	30 сек
EN 16777 Норовірус (брудні умови)	10 хв
EN 16777 Аденовірус (брудні умови)	5 хв
EN 16777 Вакциніявірус (брудні умови)	1 хв

\*DVV 2015 (суспензійний тест)

## ФАСУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ЗАСІБ	ФОРМА ФАСУВАННЯ	АРТИКУЛ
Incidin™ Liquid Пляшка	12 x 650 мл	3096170
Incidin™ Liquid Пляшка	12 x 1 л	3096220
Incidin™ Liquid Каністра	2 x 5 л	3096340

ТОВ "ЕКОЛАБ ТЗОВ"  
вул. Героїв Космосу 4,  
офіс 805 03148 м. Київ  
Україна



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany

## ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Швидкодіючий, готовий до використання дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь та медичних виробів.

## ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Засіб готовий до використання. Не розводити! Ретельно нанести розпиленням засіб на поверхню з відстані 30 см, забезпечуючи нанесення по всій поверхні. Переконайтесь, що всі поверхні повністю зволожені. Дати висохнути. Або нанести засіб безпосередньо на чисту серветку та потім обробити нею поверхню до повного зволоження і дати висохнути. Не змивати.

## АКТИВНІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

V100г засобу міститься:  
35г 2-пропанолу, 25г 1-пропанолу

## ЗБЕРІГАННЯ

Засіб зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25°C у прохолодних та сухих умовах, уникаючи впливу прямого сонячного проміння.

## ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСІБ З ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням необхідно ознайомитися з інформацією щодо застосування засобу.



ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

